



Diagnostik Osiloskop



PUSH THRU ENDOSKOPLARI

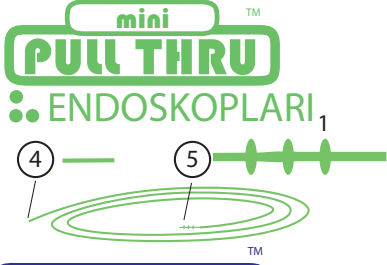


- 1 Deterjan banyosuna batırmadan önce sızdırma testi yapınız.

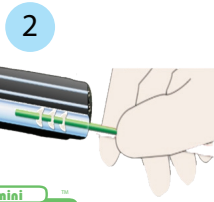

1.4> **mini PULL THRU** ENDOSCOPIES 2.6 mm no


- 2 Mini PULL THRU™ ürününün baş kısmını uzak uca doğru kontrol ediniz, çok sıkı ya da gevşek ise imalatçı talimatlarını ve kanal numarasını kontrol ediniz.

3

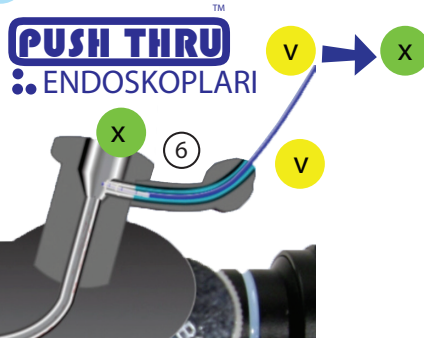

- 3 Kanalı v' den x' e doğru temizlemek için PUSH THRU™ ürününü kullanınız.


4

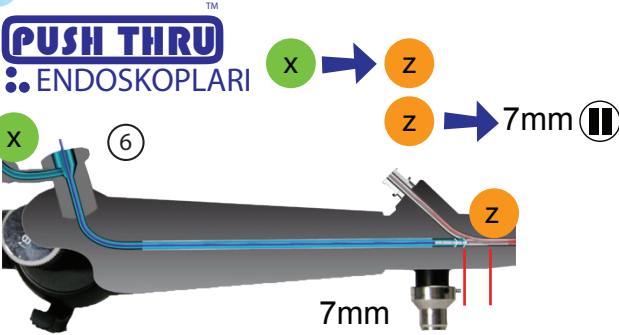

- 4 Kanalı x' den z' ye doğru temizlemek için PUSH THRU™ ürününü kullanınız


Kanalı y' den d' ye doğru temizlemek için 7 mm geri çekiniz. VE DURUN.

5

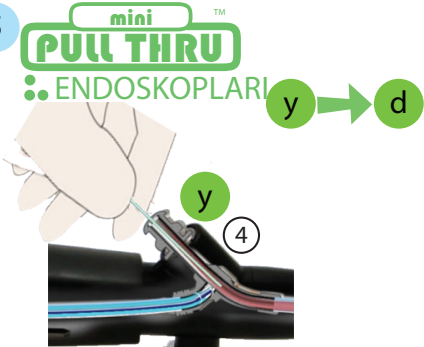

- 5 Kanalı y kanalından d kanalına doğru temizlemek için mini PULL THRU™ ürününü kullanınız.

6

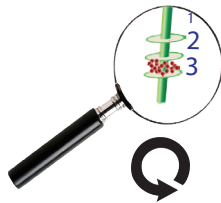

- 6 Temizleyici kısım 2 ve 3'te pislik olup olmadığını kontrol ediniz, var ise adım 5'i tekrarlayınız.

KANAL TEMİZLENENE KADAR FIRÇALAYINIZ

7



- 7 PUSH THRU™ ürününü z kanalından x kanalına doğru çekiniz.


8




8

PUSH THRU™ ve mini PULL THRU™ ürünlerini güvenli bir şekilde atınız.

Olympus®

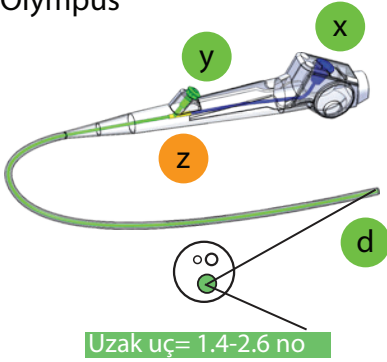

Fujinon®

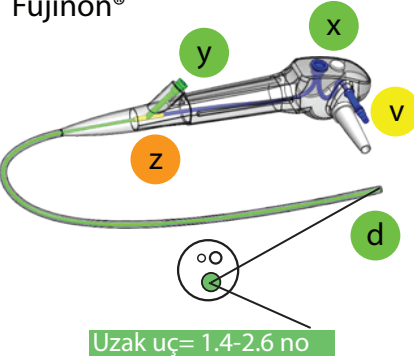

Pentax®

