

PUSH THRU™



Mevcutta var olan fırça teknolojisinin ilerisinde bulunan bilimsel olarak kanıtlanmış TEK GEÇİŞTE tüm kalıntıları ortadan kaldıran 2 silicili ve 20cm lik eşsiz dizaynı ile Devrimsel tek kullanımlık lümenli cerrahi aletlerin ve Endoskop lümen temizleme aparat

Ürün tanıtımı

Kanal

2.8-5.0mm iç çapı

Kullanılabilir uzunluk

Yaklaşık 200mm



- **PUSH THRU™**'nin eşsiz temizleyici aparatlardan oluşan tasarımı lümenli cerrahin aletlerin iç lümen girişlerinde ve endoskop kanalının içine tamamen yerleşerek boşluk bırakmaz ve böylelikle 5'li aparatları sayesinde tek seferde tüm artıkların temizlenmesini sağlar.
- **PUSH THRU™** Bronoskoplardaki kanallar ve çekme aparatı arasındaki kanalları temizlemek için kullanılabilir.
- **PUSH THRU™** İkili hareket özelliği hem kanalın temizlenmesini sağlamakta hem de alettaki kanalın temizlenmesi sırasında artıkların kanal içine kaçmasını engelleyecek bir bariyer görevi görmektedir.
- Diğer **PULL THRU™** temizleme aparatlarıyla birlikte kullanılabilir.
- **PUSH THRU™** tek kullanımlıktır ve geleneksel fırçalarda kullanılan karmaşık temizleme ve sterilizasyon işlemlerini gerektirmemektedir.

İPUÇLARI & TEKNİKLERİ

1. Doğru aletin seçildiğinden emin olmak için **PUSH THRU™** 'yu kullanmadan önce daima uzaktaki ucu kontrol ediniz. **PUSH THRU™** aletleri, köpüklü suya batırılarak kullanıldıklarında daha iyi temizlik sağlarlar (kanalın içine yerleştirmeden önce diskleri daima ıslatınız) - Nasıl yapıldığını öğrenmek için sitemizde yer alan videoyu izleyiniz.
2. Doğru aletin seçildiğinden emin olmak için **PUSH THRU™** 'yu kullanmadan önce daima uzaktaki ucu kontrol ediniz
3. Farkında olmadan yanlış aleti kullanacak olursanız zorlamayınız ve aleti çıkarınız. Zorlamanız halinde lümenli aletinize ve diğer endoskopik aletlerinize zarar verebilir ve maliyeti yüksek hasara neden olabilirsiniz.
4. **PUSH THRU™** aletleri kanala tek seferde girip çıkacak şekilde tasarlanmıştır. **PUSH THRU™** ile temizleyeceğiniz her bir kanala aleti kaç kez sokup çıkaracağınızı belirlerken kurum içi prosedürlerinizi takip ediniz.

