


GI Osiloskop

1 Deterjan banyosuna batırmadan önce sızdırma testi yapınız.


2 **2.8-5.0** **PULL THRU™** **5.0 mm no**

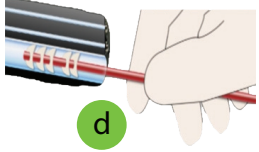

PULL THRU™ ürününün baş kısmını uzak uca doğru kontrol ediniz, çok sıkı ya da gevşek ise imalatçı talimatlarını ve kanal numarasını kontrol ediniz.



3 **2.8-5.0** **PULL THRU™** **ENDOSKOPLARI**

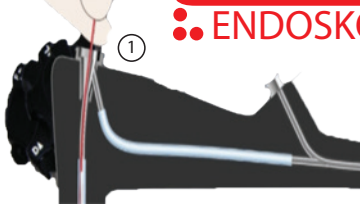


x → s
ya da s → x


Kanali x' den s' ye doğru temizlemek için PULL THRU™ ürününü kullanınız.

Temizleyici kısım 4 ve 5'te pislik olup olmadığını kontrol ediniz, var ise adım 3'ü tekrarlayınız.

KANAL TEMİZLENENE KADAR PULL THRU™ ÜRÜNÜNÜ KULLANINIZ

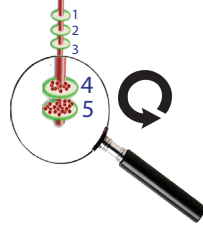

4 **2.8-5.0** **PULL THRU™** **ENDOSKOPLARI**

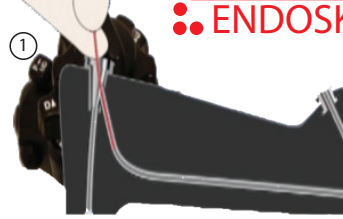


x → d


Kanali x' den d' ye doğru temizlemek için PULL THRU™ ürününü kullanınız.

Temizleyici kısım 4 ve 5'te pislik olup olmadığını kontrol ediniz, var ise adım 4'ü tekrarlayınız.

KANAL TEMİZLENENE KADAR PULL THRU™ ÜRÜNÜNÜ KULLANINIZ

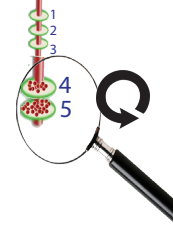

5 **2.8-5.0** **PULL THRU™** **ENDOSKOPLARI**

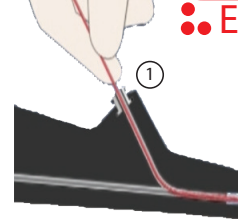


y → d

Kanali y'den d'ye doğru temizlemek için PULL THRU™ ürününü kullanınız.

Temizleyici kısım 4 ve 5'te pislik olup olmadığını kontrol ediniz, var ise adım 5'i tekrarlayınız.

KANAL TEMİZLENENE KADAR PULL THRU™ ÜRÜNÜNÜ KULLANINIZ

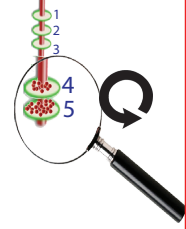

PULL THRU™ ürününü güvenli bir şekilde atınız.

