


Pedriatrik Bronkoskoplar



- 1 Deterjan banyosuna batırmadan önce sızdırma testi yapınız.

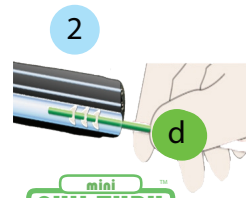

Mini PULL THRU™ ürününün baş kısmını uzak uca doğru kontrol ediniz, çok sıkı ya da gevşek ise imalatçı talimatlarını ve kanal numarasını kontrol ediniz.




Kanalı x'den s'ye doğru temizlemek için PULL THRU™ ürününü kullanınız.


Temizleyici kısım 4 ve 5'te pislik olup olmadığını kontrol ediniz, var ise adım 3'ü tekrarlayınız.

KANAL TEMİZLENENE KADAR FIRÇALAYINIZ



Olympus®

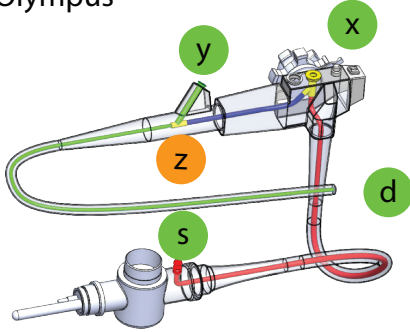


Fujinon®

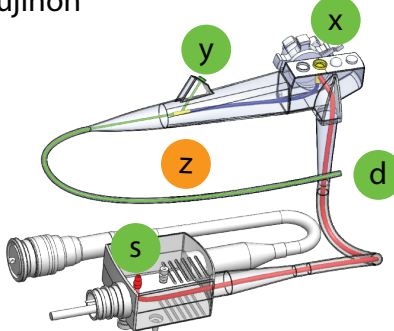

Pentax®

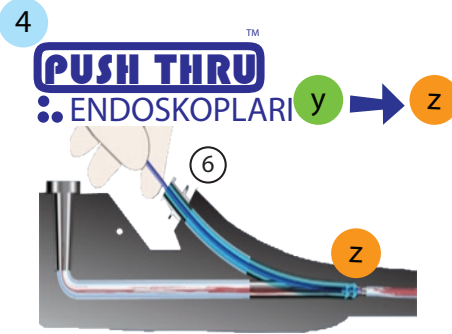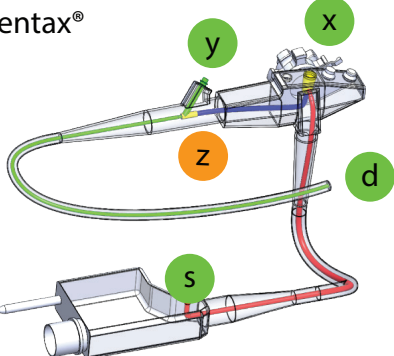


Kanalı y'den z'ye doğru temizlemek için PUSH THRU™ ürününü kullanınız.

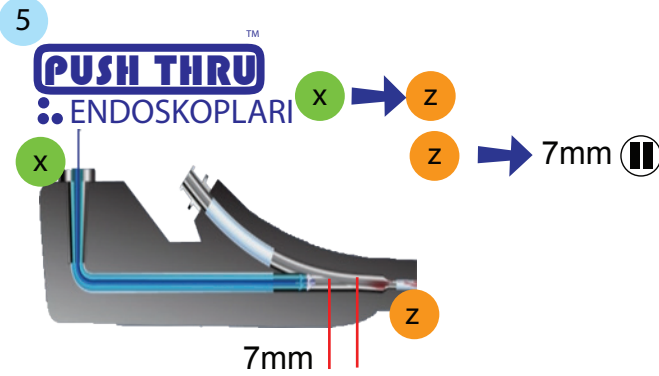

Kanalı x'den z'ye doğru temizlemek için PUSH THRU™ ürününü kullanınız.

Kanalı y'den d'ye doğru temizlemek için 7 mm geri çekiniz. VE DURUN.

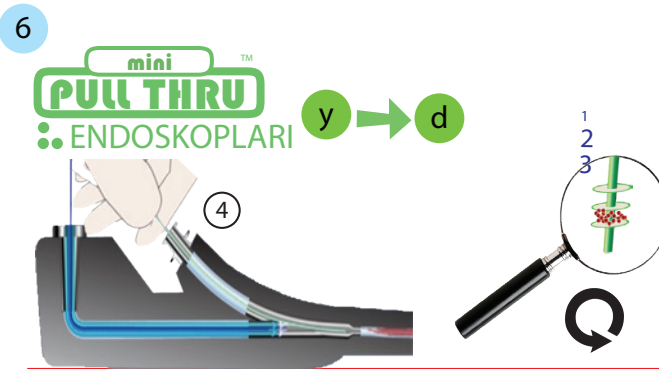

Kanalı y'den d'ye doğru temizlemek için mini PULL THRU™ ürününü kullanınız. Temizleyici kısım 2 ve 3'te pislik olup olmadığını kontrol ediniz, var ise adım 3'ü tekrarlayınız.

KANAL TEMİZLENENE KADAR FIRÇALAYINIZ



PUSH THRU™ ürününü z kanalından x kanalına doğru çekiniz.



PUSH THRU™, mini PULL THRU™ ve PULL THRU™ ürünlerini güvenli bir şekilde atınız.

Form 56015