





RADTAG

Kan Işınlama için İşlem Doğrulama ÜRÜN BİLGİ FORMU

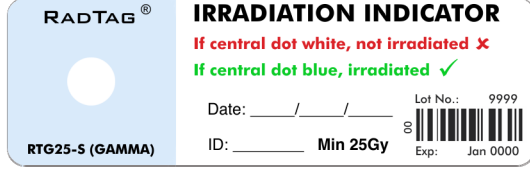

RTG25-S Gama Işınlama İndikatörü

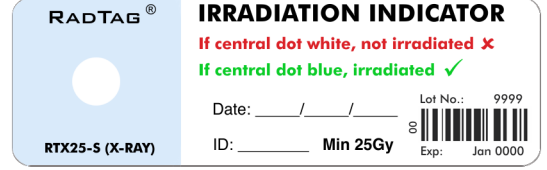


RTX25-S X-Ray Işınlama İndikatörü

Kan Ürünlerinizin Işınladığını Doğrulamanın Yenilikçi Bir Yolu


Ortadaki mavi noktanın çevreleyen referans renkle aynı veya ondan daha koyu olduğunu görsel olarak onaylayın. Bu kadar basit.

RadTag® Işınlama İndikatörü, Kan veya kan ürünü torbanın bir ışınlayıcıya yerleştirilmesinden önce kan torbasına yapıştırılır. İndikatörün hassas kısmı başlangıçta beyazdır ve iyonlaştırıcı radyasyona maruz kaldığında mavi renge döner; mavinin tonu, verilen radyasyon dozunun yaklaşık bir miktarıdır. Renk değişimi kalıcıdır ve anında gerçekleşir ve daha fazla işlem veya geliştirme gerektirmez.

Örnek Yorumlama

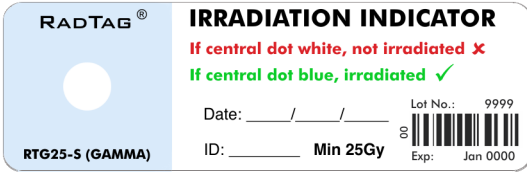

Unirradiated

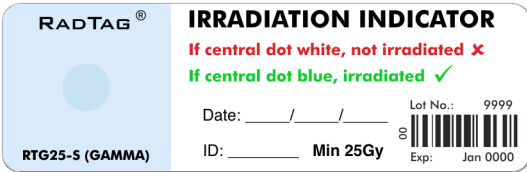

Irradiated

Düzenleyici Bilgiler

Temel etiket (Fasson® FDA 815-S), FDA'nın Federal Düzenlemeler Yasasına uygundur ve doğrudan ciltle temas için Federal Düzenlemeler Yasasının 16CFR Bölüm 1500.41 ve dolaylı gıda katkı maddesi düzenlemelerine ilişkin 21CFR Bölüm 175.105 ile uyumludur.

Kullanım Esasları

SAKLAMA

Ürün canlılığını korumak için, RadTag Kan Işınlama İndikatörleri, gama ışınlarını, x ışınlarını ve elektron ışınlarını içeren tüm nüfuz edici radyasyon kaynaklarından güvenli bir mesafede saklanmalıdır.

Işınlanmamış indikatörlerin doğrudan ve dolaylı güneş ışığı, ultraviyole radyasyonu ve ısıya maruz kalmasını önlemek için indikatörlerin sıcaklık aralığı +6°C ile -20°C olan bir buzdolabında veya dondurucuda saklanması önerilir.

KULLANIM

1. Gerekli sayıda indikatörü kutudan çıkarın.
2. Kutuyu ve içindekileri bir buzdolabına veya dondurucuya koyun.
3. Işınlamadan önce merkez noktanın beyaz olduğundan emin olun.
4. Işınlama indikatörünü kan torbası üzerindeki kuru temiz yere yapıştırın.
5. Işınlamayı gerçekleştirin.
6. Işınlamadan sonra, merkez noktanın renginin referans renkle aynı veya daha koyu olduğunu doğrulayın.

Not: RadTag® indikatörleri, radyasyon dozimetreleri olarak değil radyasyon dozunun yarı kantitatif indikatörleri olarak düşünülmelidir. Işınlayıcıya üreticisi tarafından düzenli bakım yapılması önerilir.

ISO 9001:2015 yönergelerine uygun olarak üretilmiştir



2403 – 96 Street NW, Edmonton, Alberta CANADA T6N 0A7
info@radtagtech.com www.radtagtech.com



Arjantin Caddesi No : 23/8, G.O.P. Çankaya / Ankara
Tel: +90 312 427 62 40 Fax: +90 312 427 62 41
dake@dake.com.tr www.dake.com.tr